

**МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ**  
**ПЕРИАНАЛЬНЫХ СКЛАДК НА ЯЙЦА ОСТРИЦ (ENTEROBIUS VERMICULARIS)**

**I. Биоматериал:**

- Соскоб с периаанальных складок

**II. Контейнер для биоматериала:**

- Транспортный контейнер с пластиковым шпателем

**III. Способ взятия:**

1. Материал собирается утром, следует принять позу эмбриона (лёжа, на боку, колени согнуты, прижаты к животу);
2. Приложить шпатель клейкой стороной к периаанальным складкам, прижать;
3. Шпатель поместить в транспортировочный контейнер и закрыть крышку;
4. Промаркировать: ФИО, дата/время забора.

**IV. Информация о предварительной подготовке к исследованию:**

- Взятия биоматериала производится утром, до дефекации и до проведения гигиенической обработки половых органов;
- Не допускается загрязнение тампона и шпателя каловыми массами.

**V. Условия хранения и транспортировки:**

- Контейнеры с материалом следует хранить при температуре +2...+8, доставить в лабораторию в день сбора биоматериала.